



Proporciona un **apoyo postural** a las personas con discapacidad física o con falta de control muscular durante el transporte. Cuenta con un **sistema de evacuación de emergencia**.

Características:

- **Fácil de transportar:** peso aproximado 2kg.
- **Universal:** adaptable a todo tipo de asientos.
- **Resistente:** realizado en neopreno muy confortable y permite lavarse (máx. 30°C).
- **Adaptable y duradero:** puede utilizarse con asiento elevador. Sus correas ajustables permiten adaptarse a la evolución de cada persona.

Instalación:

Base (A)




Respaldo ajustable (B)



Chaleco frontal (C)



1. Separe la base (A+ B) del chaleco frontal de retención (C).
2. Coloque la base (A+B) sobre el respaldo del asiento. Si es necesario, pliegue el asiento hacia adelante para pasar las correas que van alrededor del asiento.
3. Ajuste los cinturones al máximo para que no quede holgura.
4. Una vez que la persona esté sentada cómodamente, tome el chaleco frontal de retención (C) y ajústelo a la base (A + B). Luego ciña las 7 correas y bloquéelas, si es necesario.
5. Devuelva la parte inferior del cinturón (imagen 5).

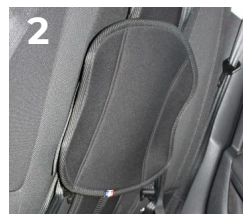

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

El cinturón de seguridad sigue siendo obligatorio, el uso del arnés postural no exime de su utilización puesto que no es un dispositivo de seguridad. Le recomendamos que consulte la normativa del país con respecto a los cinturones de seguridad del coche antes de utilizar el arnés. La utilización del arnés del vehículo queda a cargo y responsabilidad del conductor.